

Vous devez réaliser une partie d'un appareillage pour amputé tibial, à partir du positif rectifié fourni.

Effectuer un état de surface correct du positif, en prenant soin de ne pas en modifier la forme.

Réaliser un seul manchon de confort en « TPfoam » avec double calotte distale.

Stratifier l'emboîture en résine acrylique rigide (250 grammes). Les tissus de renfort seront placés de la façon suivante :

- 1 aller de « Perlon » (gaine polyamide).
- 3 allers-retours de « Nylglass » (tissu à base de verre).

Prendre soin de retourner la première et la dernière épaisseur de « Nylglass » afin que la trame ne soit pas apparente.

Casser le plâtre pour récupérer le manchon et l'emboîture.

Usiner l'extrémité distale de l'emboîture afin de l'alléger, mais sans compromettre sa rigidité.

Inscrivez votre numéro d'anonymat sur le manchon et l'emboîture, qui seront rendus.

CAP ORTHO PROTHESISTE		SUJET
EP1 REALISATION	Code : 5033106	Durée : 16h00
Session 2004	Coef, : 10	Page 1 sur 1