

RÉALISATION D'UNE PAIRE DE CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

A partir des formes données, de l'orthèse plantaire, des tiges modèle derby montant ainsi que des fournitures, en respectant la fiche de fabrication suivante, réaliser :

- ☞ la préparation au montage,
- ☞ les opérations de montage,
- ☞ les opérations de finissage.

On donne :

- cuir à première,
- collet,
- matériaux thermoformable de renfort,
- peausserie,
- matériaux composites,
- liège,
- fournitures (formes, tiges, cambrions acier, trépointe).



CAP Podo orthésiste		
Session 2004	Durée : 16 heures	Coefficient : 10
Sujet	Epreuve : EP1	Page : 1/2

TRAVAIL MAIN

Pied Gauche

Préparer les premières en cuir
Réaliser les gabarits des renforts
Préparer les éléments de renforts
 Contrefort normal
 Ailettes et bout dur classique
Monter la tige et les éléments de renforts sur la forme
Hauteur de tige arrière 14,5 cm (quartiers)
Préparation pour collage de la trépointe (cardage)

Pied droit

Préparer les premières en cuir
Réaliser les gabarits des renforts
Préparer les éléments de renforts
 Contrefort montant interne (tuteur)
 Ailettes et bout dur classique
Monter la tige et les éléments de renforts sur la forme
Hauteur de tige arrière 17 cm (quartiers)
Poser la trépointe par collage
Faire le remplissage
Afficher la semelle

TRAVAIL MACHINE sur PIED DROIT.

- Fraiser la lisse de la semelle.
- Réaliser le talon d'une hauteur de 2 cm fini après mise d'aplomb, queue de talon creusée de 5mm.
- Poncer la lisse, tranche de lisse et le talon sans coloration.
- Extraire la forme.
- Bichonner.

- Les gabarits seront rendus avec l'ensemble du travail.
- Ne pas extraire la forme du pied gauche.

CAP Podo orthésiste		
Session 2004	Durée : 16 heures	Coefficient : 10
Sujet	Epreuve : EP1	Page : 2/2